

1. Nom du produit

Chariot multi-sensoriel avec écran LED

2. Code produit

21967010

3. Couleur

Comme indiqué sur l'image

4. Description

Ce chariot Snoezel avec écran LED est livré dans une caisse de transport en bois pour des raisons de sécurité et de service.

5. Stimulations sensorielles

Toucher, odorat, ouïe et vue

6. Mise en service

1. Vous recevrez le chariot Snoezel dans une caisse en bois, comme illustré ci-dessous.
2. La caisse est assemblée avec des vis. Dévissez la plaque en bois avant et faites sortir le chariot Snoezel avec deux personnes, en raison du poids et pour éviter tout dommage.
3. Ensuite, retirez le film protecteur du plexiglas de l'écran.
4. Détachez la clé et ouvrez la porte.




5. Faites de même pour l'arrière. La clé est attachée avec un câble de fixation dans l'ouverture de la porte (poignée). Dans un chariot à matériaux, la clé se trouve au sommet du chariot (44502010).
6. Inclinez légèrement la partie arrière à l'aide du repose-pieds pour faciliter l'entrée et la sortie.



7. Remplissez maintenant le tube à bulles avec de l'eau. Veillez à ne pas trop remplir le tube et à éviter que de l'eau déborde pour prévenir tout dommage aux composants électroniques. Consultez les instructions supplémentaires pour les tubes à bulles sur notre site web.
Attention ! Ne branchez pas le chariot Snoezel tant qu'il n'est pas rempli d'eau !



8. Retirez tous les produits de l'emballage et branchez les câbles détachés aux produits correspondants.
 9. La prise du module avec l'unité à bulles peut être connectée sur le côté du chariot Snoezel.

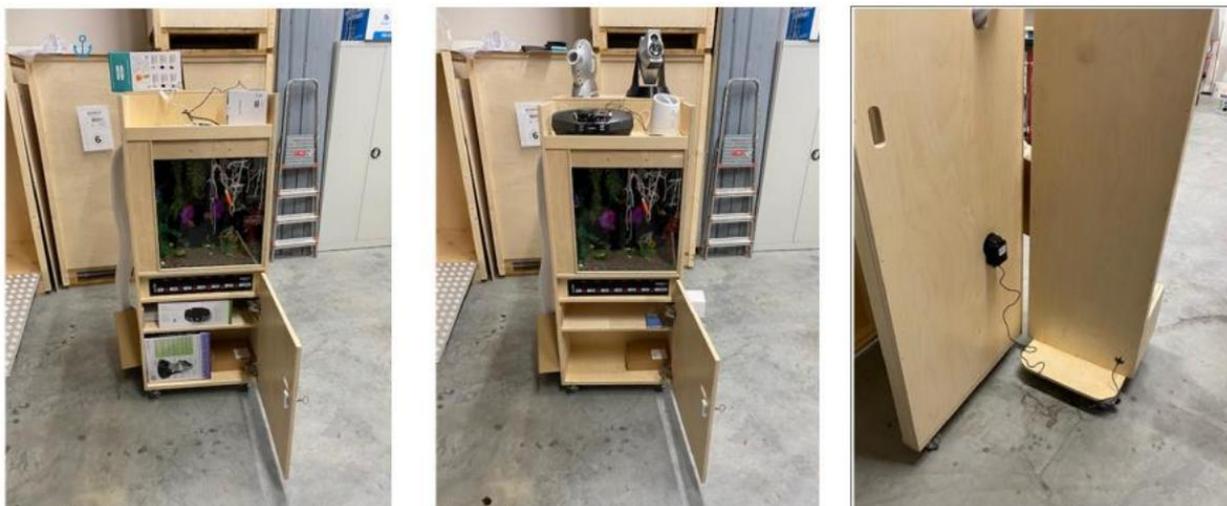

10. Dans le meuble, il y a un panneau de commande permettant d'allumer et d'éteindre les produits. **ATTENTION ! Les articles eux-mêmes peuvent également avoir un interrupteur marche/arrêt séparé.**



Pour le schéma de fonctionnement, voir le schéma fourni.

11. Branchez le chariot sur le réseau électrique et il est maintenant prêt à l'emploi !





7. Spécifications

Dimensions : 65 x 60 x 147 cm

Alimentation : 220 V

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.nenko.fr / www.nenko.be

