



1. Nom du produit

NENKO Interactif - Source lumineuse LED

2. Code du produit

18517112

3. Couleur

Blanc



4. Description

Cette source lumineuse LED de qualité et d'une fiabilité optimale, est simple d'utilisation et se branche sur la gerbe de fibres optiques (non comprises). Pour l'usage dans l'obscurité, elle vous permet de programmer rapidement et simplement. Vous pouvez ainsi choisir la fréquence de changement de couleur ou rester sur une couleur fixe.

Ce produit est compatible avec tout notre assortiment "Nenko interactif" comme le contacteur interactif Nenko (à commander séparément).

5. Contenu

1 x source lumineuse

1 x câble d'alimentation

6. Stimulation sensorielle

Vue

7. Sûreté

- Pour usage à l'intérieur dans des pièces non-humides.
- N'essayez pas à ouvrir le boîtier, il contient des pièces électroniques sensibles.
- Placez la source lumineuse à un endroit bien ventilé et ne le couvrez pas car l'appareil peut devenir chaud.
- N'accrochez rien que la gerbe de fibres optiques dans l'ouverture sur le devant du boîtier.
- Utilisez que l'adaptateur qui fourni avec l'appareil.
- Installer ce générateur de lumière hors de portée des usagers.
- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit, surtout avec des fibres optiques.
- Lorsque vous enlevez les fibres optiques, enlevez le manche avec soin, déserez la vis.
Ne jamais tirer le manche du tuyau avec vigueur.

8. Caractéristiques Techniques

Dimensions:	18 x 8 x 5cm, fil 175cm long
Poids:	470g
Alimentation:	100-240v AC 50/60Hz 0.25A
Puissance de sortie:	12v DC 1.25A 15W max
CE:	BS EN 9001-2000




9. Installation

Pas 1 :

Déballez le produit avec précaution.


Pas 2 :

1. Attachez l'embout de la gerbe de fibres optiques, dans l'ouverture sur le devant de la source lumineuse. Avant de faire ainsi, assurez-vous que la vis sur le dessus de la source, est bien dévissée, pour que la gerbe de fibres optiques, rentre aisément.
2. Enfoncez la gerbe de fibres optiques le plus possible dans l'ouverture de la source lumineuse. Il se peut que vous devriez le bouger en tournant, pour bien pouvoir rentrer l'anneau intérieur comme celle de l'extérieur.
3. Revissez la vis au-dessus de la source, pour bloquer la gerbe de fibres optiques à la source lumineuse.

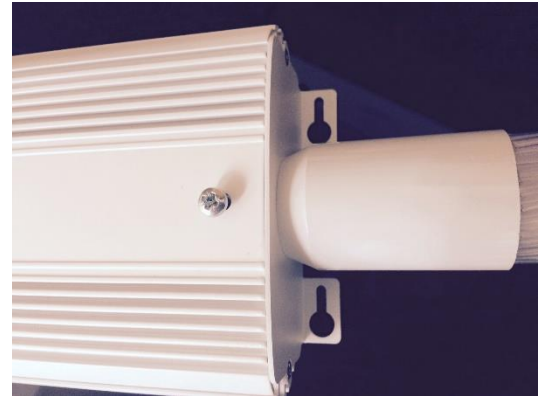


Pas 3 :

Déballez le câble d'alimentation et choisissez la bonne adaptateur qui correspond à votre prise. Posez l'adaptateur d'une côté, glissez-la jusqu'au fond et clipser-la. Voir ci-dessous.

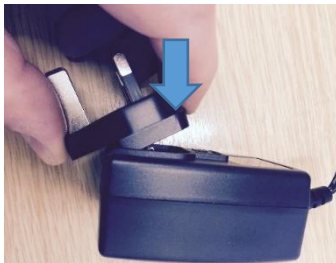

Pas 4 :

Introduisez l'embout du câble d'alimentation à l'arrière de la source lumineuse, en le poussant pour qu'il soit bien enclenché.

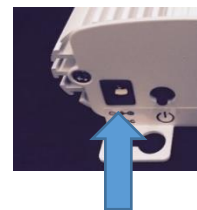


Pas 5 :


Branchez la prise au secteur.

Pas 6 :

Allumez / éteignez la source lumineuse en vous servant de l'interrupteur à l'arrière de la source lumineuse.

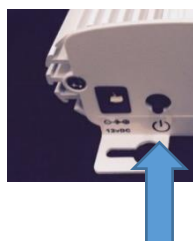

10. Fonctionnement

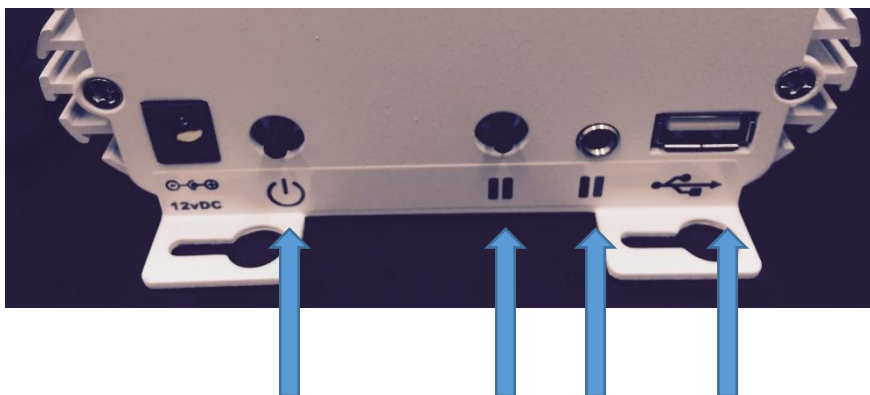

Allumer /
Eteindre

Pause /
connexion

Entrée
contacteur

Sortie USB

Allumer/éteindre	Utilisez cette interrupteur pour l'allumer ou éteindre
Pause	Appuyez brièvement sur cette interrupteur pour arrêter le défilement des couleurs. Appuyez de nouveau pour le reprendre.
Connexion	Maintenez cette interrupteur enfoncé pendant 7 secondes pour que la source s'illumine en rose. L'appareil est maintenant activé en 'mode connexion'. Dans ce mode, l'appareil clignote en rose en attendant un signal du contacteur interactif Nenko (22009 – non compris). Appuyez de nouveau pendant 7 secondes pour annuler ce mode.
Entrée contacteur	Même fonction que 'Pause / connexion' mais effectué par un contacteur interactif Nenko, en le branchant par une prise jack 3,5mm (non-compris). Renseignez-vous sur les possibilités.
USB	Cette sortie n'est pas encore utilisée, ni pré-programmée.

11. Accessoires (A commander séparément)

NENKO Interactif Contacteur - 22009

Avec ce contacteur Nenko interactif le patient peut contrôler la couleur dans l'espace et activer ou non les bulles de la colonne à bulles.



Nenko, les colonnes interactives néon LED Nenko, la source lumineuse des fibres optiques, le tunnel de profondeur Nenko, la boule lumineuse LED interactive intégrée Nenko et les bandes de lumière LED Wi Fi.





12. En cas de problèmes

Problème: Il n'y a pas de lumière

- Vérifiez que le câble d'alimentation soit bien introduit dans la source lumineuse
- Vérifiez le fusible à l'arrière de la source lumineuse
- Vérifiez qu'il n'y a pas de prise male dans la prise femelle à 5 fiches qui se trouve à l'arrière de la source lumineuse.
- Eteignez la source lumineuse, attendez une minute et puis allumez la source lumineuse de nouveau.

Problème: La lumière n'est pas très vive

- Vérifiez que le manche des fibres optiques soit bien introduit dans le tuyau au devant de la source lumineuse.
- Serrez la vis au-dessus pour retenir les fibres optiques.

Problème: Quelquefois la lumière change de couleur au hasard

Si quelqu'un d'autre utilise un autre appareil de contrôle WiFi dans une salle voisine, il est possible que votre source lumineuse réponde à l'autre appareil.

Problème: Les signales Wi Fi de deux salles voisines se confondent l'un avec l'autre

Contactez-nous. Nous pouvons fournir un autre appareil pour éviter de l'interférence.

